



注册证编号：国械注进20163633169

粘合剂

可乐丽菲露™ SE ONE

使用时的注意事项

< 使用前请一定阅读本手册 >

- 使用本品植入牙科用桩时，请不要并用“可乐丽菲露™ DC CORE ONE”以外的双固化型牙科用基牙筑造材料。
- 取本品到混合调剂板后，用遮光板将周围光线阻断，并在7分钟以内使用。由于本品含有挥发性溶剂（乙醇），溶剂挥发本品粘度增大涂布将变得难以进行。
- 涂布本品粘结面时以及10秒处理时，在使用牙科用光固化机和光固化（凝胶体）的情况下，注意调整口腔内的牙科用光固化机的角度及距离，进行降低光量的回避处理。10秒处理后用尽可能快的速度进行气吹，彻底干燥。

使用前请一定阅读使用说明书。

注册人名称：クラレノリタケデンタル株式会社

注册人住所：日本冈山县仓敷市津津1621号

生产地址：日本新泻县胎内市仓敷町2-28

代理人/中国售后服务单位：

名称：可乐丽国际贸易(上海)有限公司

地址：中国(上海)自由贸易试验区华京路8号803室

办公地址：上海市徐汇区虹桥路3号港汇中心二座2207单元

办公处电话：021-61198111-2404

“可乐丽菲露”、“可乐丽菲露 DC CORE ONE” 和 “可乐丽菲露 SE ONE”
是株式会社可乐丽的商标或注册商标。